


Gebrauchsanweisung

Stand 12.2023

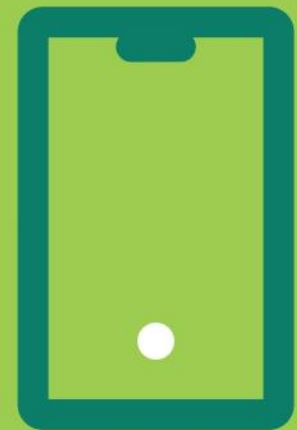

vivora diCare

iOS App 7.1.1

EvivaMed Deutschland GmbH
Thanhof 13
93173 Wenzenbach / Regensburg
info@evivamed.de
www.evivamed.de
<https://vivora.health>

© 2020 – 2023 EvivaMed Distribution GmbH
2023.12 – V3

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
1.1	Nutzer von Vivora diCare für iOS	4
1.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
1.2.1	Indikationen	4
1.2.2	Kontraindikationen	4
1.2.3	Wichtiger Hinweis zur Nutzung für gesundheitliche Zwecke	5
1.3	Verbesserung der Diabetestherapie mit Vivora diCare	5
1.4	Systemvoraussetzungen	6
1.5	Datensicherheit	6
1.6	Vorgehen im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls	6
2	Installation	7
3	Anmeldung	7
4	Home	8
4.1	Meine Profileinstellungen	9
4.1.1	Therapiedaten/ -ziele	10
4.1.2	Gerät koppeln	10
4.1.3	Synchronisation	11
4.1.4	Apple Health	11
4.1.5	E-Mail-Benachrichtigung	12
4.1.6	Datenfreigabe	12
4.2	Gerät auslesen	13
4.3	Onlinekonto synchronisieren	13
4.4	Bolusrechner	14
4.5	Bolus-Berechnungsparameter	15
4.6	Spritzplan	15
4.7	Nahrungstabelle	15
5	Tagebuch	16
6	Statistik	20
7	Trend	25
8	Mehr	25
8.1	Grundeinstellungen	26
8.2	Tagebucheinstellungen	27
8.3	Hilfe & Kontakt	27
8.4	Über & Datenschutz	28
8.5	Bewertung Vivora diCare	28



SINOVO health solutions GmbH

Willy-Brandt-Str. 4

61118 Bad Vilbel

info@sinovo.de

www.sinovo.de

© 2003-2023

1 Allgemeines

1.1 Nutzer von Vivora diCare für iOS

Vivora diCare ist ein digitales Software-System für Menschen mit Diabetes und unabhängig vom Diabetestyp (Typ-1-, Typ-2- oder Typ-3-Diabetes bzw. Gestationsdiabetes) nutzbar. Als Mensch mit Diabetes können Sie es gemeinsam mit Ihrem behandelnden Arzt, Diabetes-Team und/oder weiteren Bezugspersonen rund um die Uhr anwenden. Die Software ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Medizinprodukt Vivora diCare soll Sie in Ihrem täglichen Diabetes-Management unterstützen. Mit Vivora diCare können Sie z. B. Ihre Werte aus den verwendeten Geräten, wie dem Blutzuckermessgerät bzw. dem Kontinuierlichen Glukosemesssystem (CGM), dem Blutdruckmessgerät, der Körperwaage, dem Schrittzähler etc. auslesen und diese individuell erfassten Messwerte auch über Wochen und Monate aufzeichnen. Die Software speichert dabei Ihre Daten und stellt sie in übersichtlichen Grafiken im gewünschten Zeitraum dar. Mit Vivora diCare ist auch der Datenaustausch mit Ihren mobilen Geräten oder anderen Vivora Anwendungen, wie z. B. der Auswertungen oder der Statistik, möglich. Sofern Sie dies wünschen, können Ihre Messwerte, etwa aus Ihrem digitalen Tagebuch, ebenfalls kontinuierlich erfasst und an Ihren behandelnden Arzt weitergeleitet werden. Dem medizinischen Team stehen die gleichen Funktionen wie dem Patienten zur Verfügung.

1.2.1 Indikationen

Vivora diCare wurde für alle Formen des Diabetes mellitus entwickelt. Menschen mit Diabetes müssen hierfür vor allem in der Lage sein, die Informationen der Anwendung richtig zu interpretieren und entsprechend zu handeln. Der „*Bolusrechner*“ z. B. ist nur für die Verwendung mit kurzwirksamen Insulinen vorgesehen.

1.2.2 Kontraindikationen

Es liegen keine bekannten Kontraindikationen für die Nutzung von Vivora diCare vor. Der integrierte „*Bolusrechner*“ darf allerdings bei folgenden Therapien nicht verwendet werden:

- alle Therapien mit Mischinsulin oder ausschließlich langwirkenden Insulinen.
- Basal-unterstützte orale Therapie (BOT) mit oder ohne GLP-1-Rezeptor-Agonisten.
- ergänzende Insulintherapie mit präprandialen Injektionen ohne Basalinsulin

Für alle weiteren Funktionen gibt es keine Kontraindikation. Dies gilt auch für die gesundheitliche Situation von pflegebedürftigen Menschen, ausgenommen, es liegen Einschränkungen der geistigen Fähigkeiten vor.

1.2.3 Wichtiger Hinweis zur Nutzung für gesundheitliche Zwecke

Sofern Sie Vivora diCare zur Aufzeichnung Ihrer relevanten Therapiedaten verwenden, ist die Software hierbei lediglich als Hilfsmittel gedacht, um die von Ihnen eingegebenen Messwerte zu protokollieren.

Die Software kann selbstverständlich keine medizinische Versorgung bzw. ärztliche Therapie ersetzen. Jede Veränderung Ihrer Diabetestherapie (z.B. BE-Faktoren, Kohlenhydrat-Insulin (KI)-Faktoren, Korrekturregeln, Insulindosen) müssen Sie deshalb wie gewohnt mit Ihrem Arzt abstimmen. SINOVO haftet nicht für gesundheitliche Folgekomplikationen jedweder Art, die sich aus einer falschen Therapieanwendung ergeben (z.B. Abgabe falscher Insulindosen). Dies gilt u.a. auch dann, wenn das Programm über den „*Bolusrechner*“ eine Insulindosis vorschlägt. Diese Berechnungen sind als unverbindliche Vorschläge zu werten und immer mit dem behandelnden Arzt auf deren Richtigkeit und Anwendbarkeit zu prüfen.

Im Therapiekontext sind häufige Datensicherungen ebenfalls sinnvoll, um bei einem möglichen Datenverlust die Behandlung kontinuierlich fortsetzen und damit die Datenüberwachung sicherstellen zu können. Für weitere Informationen siehe [„Datensicherheit“](#).

1.3 Verbesserung der Diabetestherapie mit Vivora diCare

Zahlreiche Studien belegen, dass ein gut geführtes Blutzuckertagebuch (selbst in Papierform) zu einer besseren Diabeteseinstellung führt. Entsprechende Studien zeigen, dass der HbA1c-Wert der Patienten dadurch um bis zu einem Prozentpunkt gesenkt werden konnte. Das Führen eines elektronischen Tagebuchs birgt weiteres Verbesserungspotenzial: wiederkehrende Fehlersituationen werden dadurch schneller erkannt und mit der insgesamt besseren Datenbasis lassen sich auch feinste Optimierungen zeitnah vornehmen.

Bedenken Sie bitte immer: Das Auslesen von Messgeräten allein protokolliert zwar die Ergebnisse Ihrer Selbstkontrolle, verbessert aber nicht automatisch Ihre Diabeteseinstellung. Vor allem bei plötzlichen Glukoseschwankungen (Überzucker/Unterzucker) ist es daher hilfreich, wenn Sie auch die Begleitumstände in Vivora diCare festhalten: Was haben Sie gegessen? Wieviel haben Sie gespritzt? Gab es ungewohnte körperliche Belastungen oder hatten Sie vielleicht gerade mit einer Begleiterkrankung (Erkältung, Grippe u.a.) zu kämpfen? Wenn Sie also die näheren

Umstände für einen ungünstigen Glukosewert schon frühzeitig erkennen, haben Sie beim nächsten Mal schon im Vorfeld die Chance, entsprechende Anpassungen vorzunehmen und so ein besseres Ergebnis für ihren Glukoseverlauf zu erzielen.

1.4 Systemvoraussetzungen

Die Vivora diCare App erfordert iOS 12.3 oder neuer. Sie kann sowohl auf einem iPhone als auch auf einem iPad oder iPod Touch verwendet werden.

Aufgrund von Betriebssystemupdates und/oder Hardwareupdates Ihres mobilen Geräts kann es zu Beeinträchtigungen der Vivora diCare App kommen. Bitte prüfen Sie dann, ob es für Vivora diCare ebenfalls ein Update gibt, oder melden Sie sich per Mail bei info@evivamed.de

1.5 Datensicherheit

Da es sich bei Ihren protokollierten Dokumentationen und Werten um gesundheitsrelevante Daten handelt, die auch nach einem sehr langen Zeitraum noch relevant sein können, etwa für die Erstellung von Attesten, Gutachten u.a., sollten Sie diese Daten entsprechend sorgfältig behandeln. Dazu gehören vor allem regelmäßige Datensicherungen („Backups“).

Eine gute Möglichkeit der Datensicherung ist die Nutzung der Online-Version von Vivora diCare (<https://care.vivora.health/>). Ihre Diabetes- und Vitaldaten können Sie hier regelmäßig mit dem Online-Server abgleichen. Bei einem eventuell auftretenden Schaden müssen Sie auf Ihrem Gerät nur die Vivora diCare App neu installieren. Nach einem erneuten Abgleich und einer Synchronisation mit Ihrem Online-Konto von Vivora diCare wird die letzte Version ihres gesicherten Datenbestands auf Ihr mobiles Gerät übertragen.

1.6 Vorgehen im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls

Informieren Sie bitte die SINOVO health solutions GmbH, sowie die EvivaMed Deutschland GmbH oder Ihren lokalen Vertriebspartner und Ihre lokale Gesundheitsbehörde bei schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen (z.B. schwere Verletzungen oder Krankenhausaufenthalt) und/oder Fehlfunktionen der Vivora diCare Applikation.

2 Installation

Vivora diCare kann im iTunes App Store unter folgendem Link heruntergeladen werden: <https://apps.apple.com/de/app/vivora-dicare/id1596461118>

Die Vivora diCare App erfordert mindestens die Version iOS 12.3 und kann auf dem iPhone, dem iPad oder dem iPod Touch verwendet werden.

3 Anmeldung

Anmeldung 🇩🇪

E-Mail-Adresse
E-Mail-Adresse eingeben

Kennwort
Kennwort eingeben

Anmelden

Durch die Eingabe Ihres Logins wird dieser dauerhaft gespeichert und Vivora diCare synchronisiert Ihre Daten mit Ihrem Online-Konto. Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät nicht von Unbefugten genutzt wird.

Blindenmodus

Sie haben noch keinen Vivora diCare Account?
[Klicken Sie hier](#)

Beim Starten der App gelangen Sie auf die nebenstehende „Anmeldung“. Diese Anmeldemaske ist standardmäßig auf Deutsch eingestellt. Über die Landesflagge oben rechts können Sie die Sprache der App ändern.

Bitte geben Sie Ihre Login-Daten ein, die Sie für Ihr Vivora diCare Online-Konto eingerichtet haben und klicken dann auf „Anmelden“.


Durch die Eingabe Ihres Logins wird dieser dauerhaft gespeichert und Vivora diCare synchronisiert Ihre Daten mit Ihrem Online-Konto.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät nicht von Unbefugten genutzt wird. Solange Sie sich also nicht aktiv aus der App abmelden, müssen Sie diese Login-Daten auch nicht erneut eingeben. Möchten Sie nicht dauerhaft angemeldet bleiben, melden Sie sich nach der App-Nutzung bitte über „Meine Profileinstellungen“ und den Button „Abmelden“ wieder ab.

Der „Blindenmodus“ ist empfehlenswert, wenn Sie die App mit der bei Apple integrierten Vorlese-Anwendung (sog. Screenreader „VoiceOver“) benutzen wollen. Sobald dieser Modus eingeschaltet ist, zeigt die „Statistik“ keine grafischen Elemente an.

Falls Sie noch kein Vivora diCare Nutzerkonto haben, gelangen Sie über den Link „[Klicken Sie hier](#)“ auf die Registrierungsmaske von Vivora Online, um sich ein Konto anlegen zu können.

4 Home

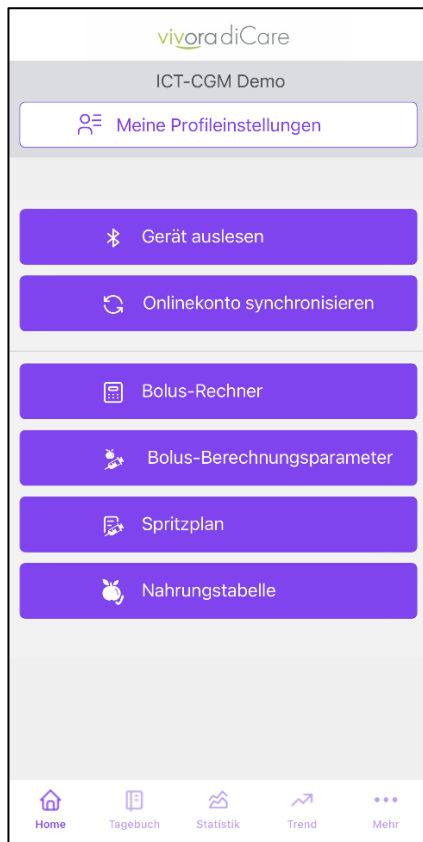

Der „*Home*“-Screen ist die Startseite Ihrer Vivora diCare App. Von hier aus haben Sie Zugriff auf folgende Bereiche und Funktionen:

Sie können auf [„Meine Profileinstellungen“](#) zugreifen, ein bereits gekoppeltes [„Gerät auslesen“](#) und Ihre Daten mit Ihrem [„Onlinekonto synchronisieren“](#).


Weitere Funktionen:

- [Bolusrechner starten](#)
- [Bolus-Berechnungsparameter ansehen](#) (therapieformabhängig)
- [Spritzplan anzeigen](#) (therapieformabhängig)
- [Nahrungstabelle öffnen](#)

Über die untere Navigationszeile gelangen Sie zu den Bereichen [„Tagebuch“](#), [„Statistik“](#), [„Trend“](#) und [„Mehr“](#).

Alle Funktionen werden in den folgenden Kapiteln näher beschrieben.

4.1 Meine Profileinstellungen

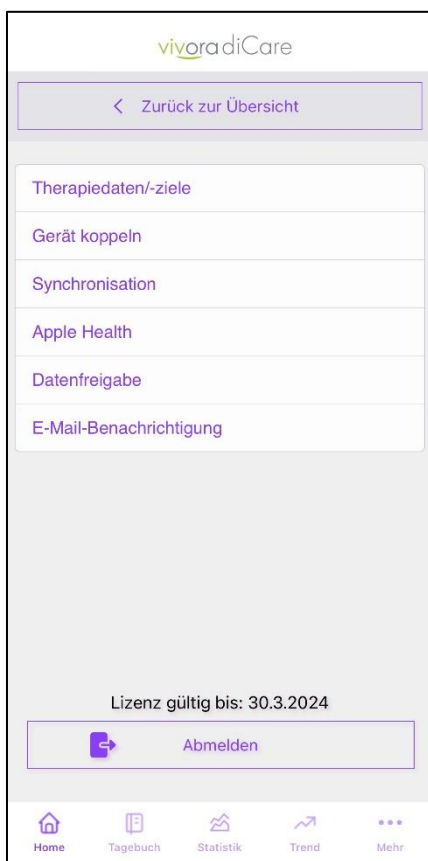

Unter „*Meine Profileinstellungen*“ sind folgende Optionen aufgeführt:

- [Therapiedaten/-ziele](#)

Hier können Sie all Ihre Therapiedaten und -ziele einsehen, welche Sie in Ihrem Onlinekonto eingestellt haben und ggf. ändern.

- [Gerät koppeln](#)

Hierüber können neue bzw. weitere Geräte initial mit der App verbunden werden.

- [Synchronisation](#)

Hier sehen Sie die Verbindungseinstellungen mit Ihrem Online-Konto sowie die Einstellung zur Auto-Synchronisation.

- [Apple Health](#)

Hierüber kann der Austausch von Daten mit Apple Health gesteuert werden.

- [Datenfreigabe](#)

Wenn Sie Ihre Daten mit Ihrem Diabetes-Team teilen möchten, können Sie hier Ihre Datenfreigabe einrichten.

- [E-Mail-Benachrichtigung](#)

Über diese Funktion können Sie Benachrichtigungen an Bezugspersonen einstellen.

Hier sehen Sie außerdem die Laufzeit Ihrer aktuellen Lizenz.


Über den Button „*Abmelden*“ können Sie sich aus der Vivora diCare App abmelden. Damit sind Sie nicht mehr automatisch mit dem Online-Konto verbunden. Beim nächsten Start der App müssen Sie erneut Ihre Zugangsdaten eingeben.

4.1.1 Therapiedaten/ -ziele



Sie haben die Möglichkeit Ihre Therapiedaten und -ziele, welche Sie in Ihrem Onlinekonto eingestellt haben, einzusehen. Änderungen an bestehenden Therapiedaten oder -zielen können Sie über „Therapiedaten/-ziele ändern“ vornehmen.

4.1.2 Gerät koppeln

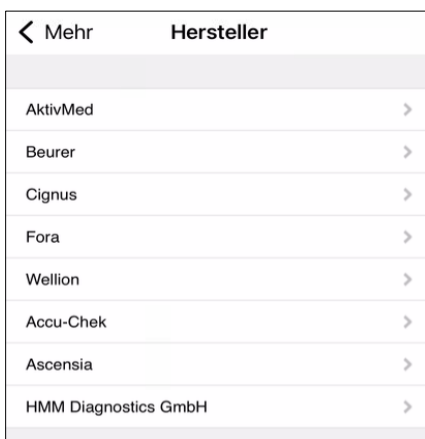

In dieser Maske finden Sie eine Übersicht der Geräte und Hersteller, die Sie über Bluetooth mit der Vivora diCare App koppeln können.

Für die Kopplung wählen Sie erst einen Hersteller und dann das gewünschte Messgerät aus.




Nach der Wahl des Messgeräts gehen Sie bitte wie folgt vor:

„Dubletten vermeiden“ bedeutet, dass nicht zwei Daten zur gleichen Uhrzeit übernommen werden sollen, z. B. bei einer Kontrollmessung oder mehrmaligem Auslesen eines Gerätespeichers. Bitte setzen Sie hier einen Haken (falls noch nicht vorhanden).

Über die Funktion „*Gerät auslesen*“ starten Sie den Kopplungsvorgang. Folgen Sie hier einfach den Anweisungen der App und des Messgeräts. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Messgerät und Smartphone Bluetooth aktiv ist.

Bei erfolgreicher Kopplung erscheint in der Ansicht die Gerätenummer. Eine Übersicht Ihrer gekoppelten Geräte finden Sie unter „*Home*“ → „Gerät auslesen“.

4.1.3 Synchronisation

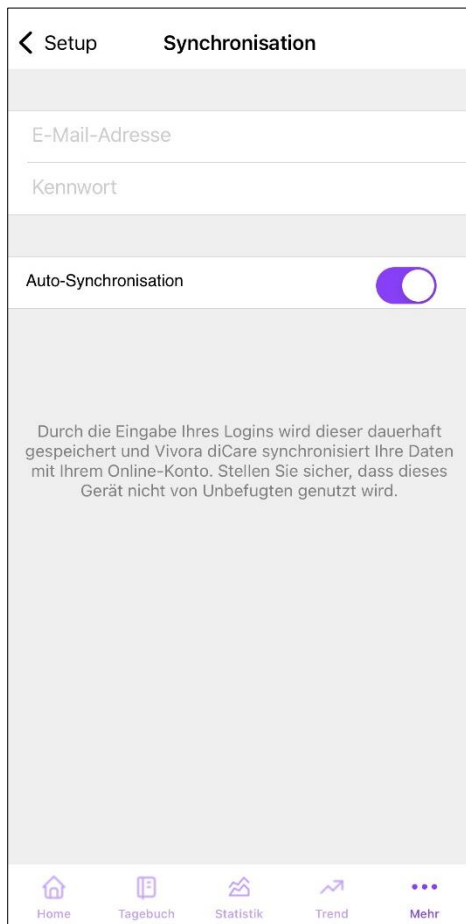

Unter „*Synchronisation*“ wird angezeigt, mit welchem Onlinekonto Ihre App verbunden ist und die Daten austauscht. Aufgrund Ihres gespeicherten Logins sind diese Daten bereits ausgefüllt.

Die automatische Synchronisation mit dem Onlinekonto ist standardmäßig aktiv. Sollten Sie dies nicht wollen, deaktivieren Sie die Funktion über den Schieberegler „Auto-Synchronisation“.

4.1.4 Apple Health



Mit dieser Funktion können Sie eine Verknüpfung zu Ihrer „*Apple Health-Anwendung*“ herstellen. Dies ermöglicht Ihnen z.B. den Import Ihrer CGM-Daten aus einem Dexcom-Gerät. Zudem können Sie Ihre Aktivitätsdaten („*Schritte*“) direkt in Vivora diCare importieren. Aktivieren Sie hierfür „*Daten importieren*“ und wählen Sie im nächsten Schritt, welche Daten übertragen werden sollen.

Sie können Ihre Daten auch aus der Vivora diCare App in Ihre „*Apple Health*“-Anwendung exportieren.

4.1.5 E-Mail-Benachrichtigung

Abbrechen	E-Mail-Benachrichtigung	Fertig
Empfänger-Name		
Empfänger-E-Mail		
Mein Name		
Glukose Min.		
Glukose Max.		
PIN		
PIN wiederholen		


Über die Funktion „*E-Mail-Benachrichtigung*“ wird automatisch per Mail eine Bezugsperson kontaktiert, sollte es im Verlauf zu einer Über- oder Unterschreitung der von Ihnen festgelegten Grenzwerte kommen.

Die Einstellungen dazu können Sie mit einer frei wählbaren Sicherheitsnummer (PIN) schützen. Eventuelle Änderungen sind dann nur nach Eingabe dieser PIN möglich.

4.1.6 Datenfreigabe

Über die Datenfreigabe können Sie Ihre Daten an einen Arzt oder Hilfsmittelleistungserbringer freigeben, die ebenfalls Vivora nutzen. Lassen Sie sich hierfür den Praxiscode geben, tragen Sie diesen ein und entscheiden, ob eine Lese- oder Schreibfreigabe erteilt werden soll. Über „Daten freigeben“ bestätigen Sie die Freigabe Ihrer Daten. Diese Einstellung können Sie jederzeit widerrufen.


4.2 Gerät auslesen

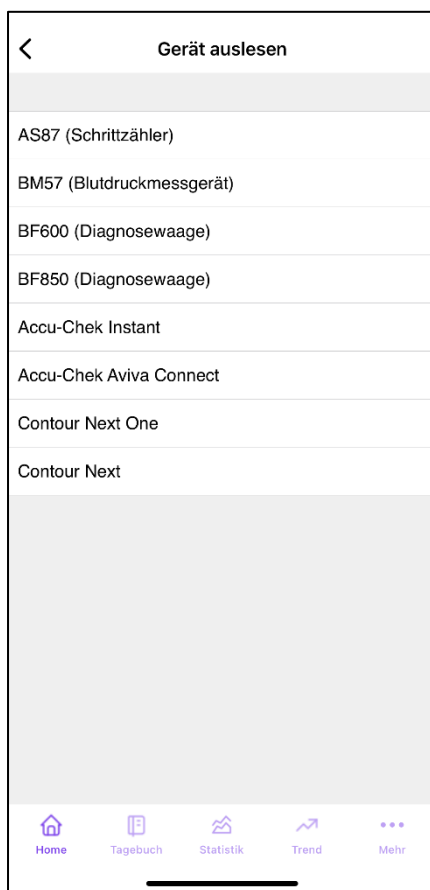

Mit der Funktion „*Gerät auslesen*“ gelangen Sie zu einer Übersicht Ihrer bereits gekoppelten Geräte. Diese Option vereinfacht das tägliche Datenauslesen aus Ihren gängigen Geräten. Das Auslesen der Geräte starten Sie direkt mit Klick auf das jeweilige Messgerät. Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Messgerät und auf Ihrem Smartphone Bluetooth aktiv ist.

Für die erstmalige Anbindung Ihrer Messgeräte informieren Sie sich bitte unter [„Messgerät\(e\) koppeln“](#).

4.3 Onlinekonto synchronisieren

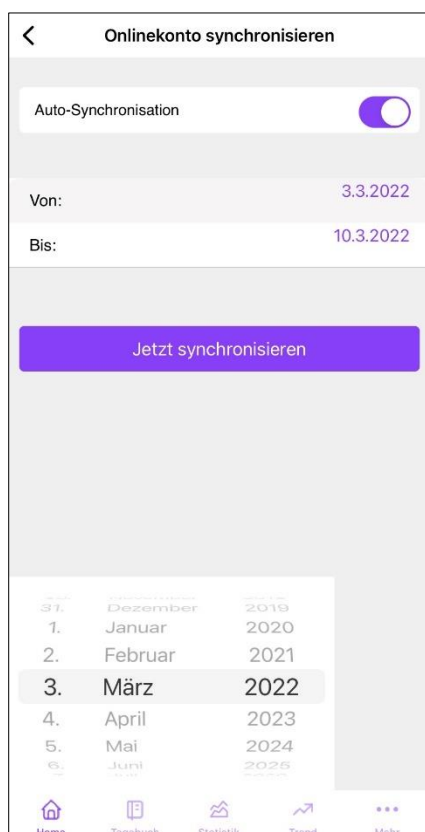








Unter „*Onlinekonto synchronisieren*“ können Sie den Datenbestand der App mit Ihrem Online-Konto synchronisieren, d.h. beide auf denselben Stand bringen. Die Verknüpfung mit Ihrem Online-Konto erfolgt automatisch durch Ihren Login und kann unter dem Menüpunkt „*Meine Profileinstellungen*“ → „*Synchronisation*“ eingesehen werden.

Sie können Ihre Daten entweder manuell durch Eingabe eines individuellen Zeitraums synchronisieren oder die Auto-Synchronisation über den Schieberegler aktivieren.

Mit „*Jetzt synchronisieren*“ werden sowohl die Daten von Ihrer App auf das Online-Konto als auch in die andere Richtung (bidirektional) ausgetauscht. Auf beiden Plattformen ist dann der identische Datenbestand zu finden.

4.4 Bolusrechner

Schließen		Bolusrechner		Übernehmen																					
Blutzucker	[mg/dL]																								
Zielwert		130																							
Korrekturfaktor		50																							
Essenszufuhr																									
Essens-Faktor		1,7																							
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>,</td> <td>0</td> <td>></td> <td>+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						1	2	3	/		4	5	6	*		7	8	9	-		,	0	>	+	
1	2	3	/																						
4	5	6	*																						
7	8	9	-																						
,	0	>	+																						

Für die Nutzung des „*Bolusrechners*“ klicken Sie auf dem Home-Bildschirm auf „*Bolusrechner*“.

Wenn Sie die Nutzungsbedingungen akzeptiert haben, können Sie mit der Bolusberechnung starten.

Grundlage für eine korrekte Berechnung und Nutzung des Bolusrechners sind Ihre Einstellungen in der Online-Version. Bitte hinterlegen Sie hier Ihre genutzte Einheit Kohlenhydrate, welche bestimmt, ob Sie mit Gramm Kohlenhydrate, BE (=12g Kohlenhydrate) oder KE/KHE (=10g Kohlenhydrate) rechnen. Sofern Sie mit BE oder KE/KHE rechnen, geben Sie bitte als Essens-Faktor entsprechend Ihre BE/KE-Faktoren in den Therapiedaten beim ein. Bei Gramm Kohlenhydrate tragen Sie bitte Ihr Kohlenhydrat-Insulin-Verhältnis ein. Vervollständigen Sie Ihre Angaben mit dem entsprechendem Korrekturfaktor und Zielwert und somit ist die Einstellung des Bolusrechners abgeschlossen. Alle Eingaben werden automatisch übernommen und für Sie vorgelegt – individuelle Änderungen im Bolusrechner selbst sind jederzeit möglich.

Tragen Sie lediglich Ihren aktuellen Blutzucker-/Glukose-Wert und die Menge der Kohlenhydrate ein, die Sie essen möchten und starten Sie die Berechnung des Bolus über das „Enter-Symbol“.

Ihr aktueller Wert, Ihre Menge an Kohlenhydraten und der berechnete Bolus werden mit „Übernehmen“ direkt in Ihr Tagebuch überführt.

Wenn Sie mit Gramm Kohlenhydrate (gKH) rechnen, rechnet der „*Bolusrechner*“ mit folgender Formel:

$$\text{Bolus} = \text{gKH} / \text{Kohlenhydrat-Insulin-Verhältnis}$$

Sofern Sie eine Austauschereinheit aktiviert haben, verwendet der „*Bolusrechner*“ folgende Formel:

$$\text{Bolus} = \text{BE/KE} * \text{BE-/KE-Faktor}$$

Beachten Sie: Bei der Übernahme der Berechnung findet keine Rundung statt. Darauf wurde bewusst verzichtet, da teilweise situativ und zum aktuellen Zeitpunkt der Berechnung entschieden werden muss, ob ein Wert auf- oder abgerundet wird. Diese Entscheidung kann Ihnen Vivora diCare nicht abnehmen und übernimmt dafür entsprechend auch keine Haftung.

4.5 Bolus-Berechnungsparameter

Diese Funktion wird nur bei Therapieformen mit kurzwirksamen Insulin angezeigt. Über die Einstellungen zur Bolus-Berechnung können Sie in der Online-Version Ihre Angaben zu den Essens-Faktoren und Korrekturfaktoren mit den entsprechenden Zielwerten einsehen, die Sie festgelegt haben. Wenn Sie die Einheit „Gramm Kohlenhydrate“ verwenden und in Ihren Therapiedaten hinterlegt haben tragen Sie als Essens-Faktor bitte Ihr Kohlenhydrat-Insulin-Verhältnis ein. Bei der Einheit BE oder KE/KHE tragen Sie den entsprechenden BE oder KE/KHE-Faktor ein.

4.6 Spritzplan


Die Funktion „Spritzplan“ steht Ihnen dann zur Verfügung, wenn Sie eine Therapieform haben, bei der Sie kurzwirksames Insulin spritzen.

Über einen Absprung in die Online-Version können Sie Ihren eingegebenen Spritzplan ansehen.

4.7 Nahrungstabelle

Über den Button „Nahrungstabelle“ gelangen Sie in die umfangreiche Nahrungsmitteldatenbank von Vivora Online.

5 Tagebuch

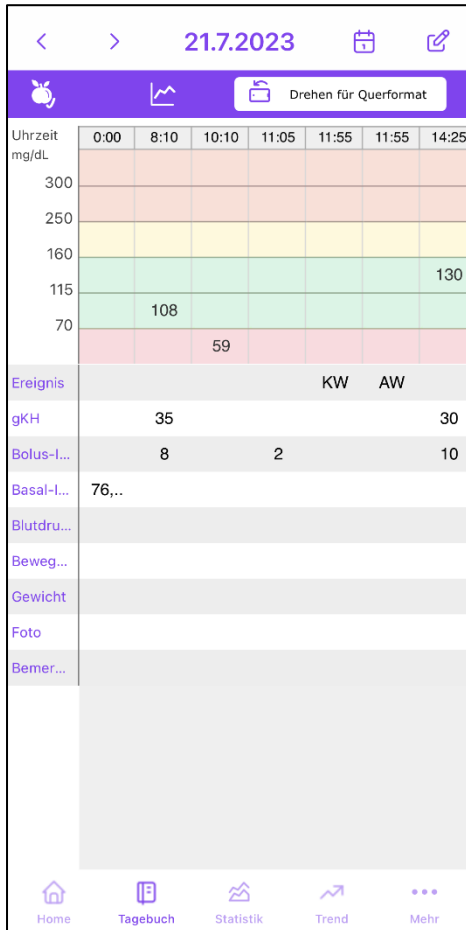

Über den Button „Tagebuch“ in der unteren Navigationszeile gelangen Sie auf Ihr „Tagebuch“, in dem all Ihre erfassten Werte je Tag zusammengeführt werden.


In der oberen Zeile sehen Sie das Datum, voreingestellt ist immer der aktuelle Tag.

Über die „Pfeiltasten“ können Sie jeweils einen Tag vor- bzw. zurückspringen und über das „Kalendersymbol“ ein anderes Datum wählen.

Das „Stift-Symbol“ öffnet die Werteeingabe, über die Sie alle Werte manuell eintragen können. Um diese Funktion zu öffnen, können Sie auch in ein beliebiges Feld des Tagebuchs klicken.

Sofern Ihnen ein Eintrag zu breit für eine Spalte erscheint und dadurch z. B. nicht vollständig angezeigt wird, können Sie diesen Eintrag anklicken und in der Werteeingabe genauer einsehen und bei Bedarf bearbeiten.


Die Auflistung des Tagebuchs ist standardmäßig eingestellt. Um diese Parameter anzupassen oder zu erweitern, siehe [„Tagebucheinstellungen“](#).

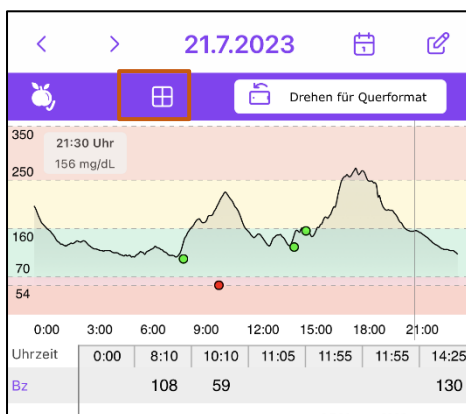

Sollten Sie ein CGM-System nutzen, können Sie sich die CGM-Kurve als 24h Ansicht in Ihrem Tagebuch sichtbar schalten.

Über das eingerahmte Icon können Sie jederzeit die Darstellung des Tagebuchs ändern, indem Sie die CGM-Kurve ein- oder ausblenden. Durch Verschieben der vertikalen Linie erhalten Sie Detailinformationen zu den Einzelwerten.

Sollten Sie zusätzlich Blutzucker messen, erscheinen diese Werte als farbige Punkte in der Kurve und in der Tabelle unter „BZ“.

Abbrechen	Werteeingabe	Fertig
Stammdaten - 28.4.2023		
Uhrzeit	15:10	>
Blutzucker	mg/dL	
Ereignis Keine Auswahl		>
Kohlenhydrate	gKH	
Mischinsulin	I.E.	
2.Mischinsulin (opt.)	I.E.	
Blutdruck	 Sys/Dia/Puls	
Bewegung Keine Auswahl		>
Gewicht	kg	
Foto		
Bemerkungen Keine Auswahl		>

Um Ihre Werte grundsätzlich manuell bearbeiten oder eintragen zu können, klicken Sie im Tagebuch auf das „Stift-Symbol“ oben rechts.

Es öffnet sich die „Werteeingabe“ mit dem im Tagebuch ausgewählten Datum und der aktuellen Uhrzeit (diese kann geändert werden).

Hier können Sie auf der rechten Seite die jeweiligen Einträge einsehen, hinzufügen oder verändern. Wenn Sie Ihre Bearbeitung abschließen und speichern möchten, klicken Sie einfach rechts oben auf „Fertig“. Anschließend werden diese Daten in das „Tagebuch“ übernommen.

Auch innerhalb der „Werteeingabe“ können Sie den [„Bolusrechner“](#) starten.

Datentypen	
Spritzstelle Bauch links	>
Schichtdienst Nachtschicht	>
Eiweiss	Eiweiss

Sie können auch weitere „Datentypen“ hinzufügen, die Sie über das Tagebuch verwalten möchten, (z.B. Spritzstelle, Schichtdienst, Eiweiß, usw). Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:


Vordefinierte „Datentypen“:

Über den Button „Mehr“ in der unteren Menüleiste → [„Tagebucheinstellungen“](#) können Sie weitere vordefinierte „Datentypen“ für Ihr Tagebuch aktivieren.

Eigene, individuelle „Datentypen“ können nur über die PC-Version hinzugefügt werden.


Ihre ausgewählten „Datentypen“ sind jetzt sowohl in der „Werteeingabe“ als auch im „Tagebuch“ zu sehen und können somit erfasst werden.


Mit Vivora diCare können Sie das Tagebuch auch im „Querformat“ betrachten, drehen Sie hierfür einfach Ihr Smartphone:

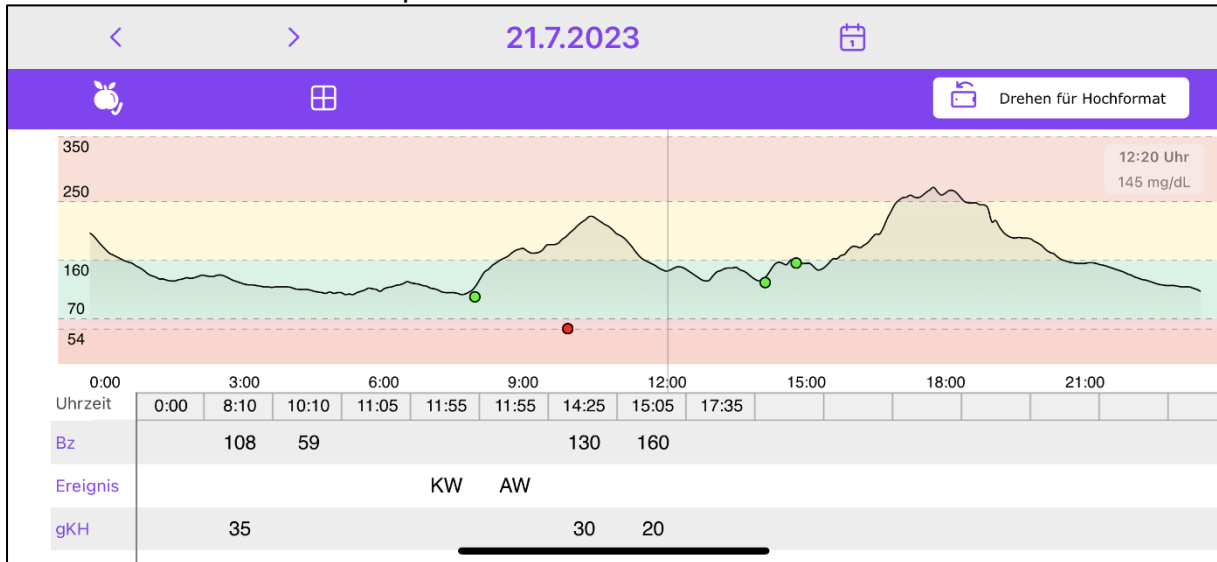

Beachten Sie bitte: Aktuell ist im Querformat nur eine Betrachtung der Daten möglich, noch nicht aber deren Bearbeitung!

Im „Querformat“ lässt sich mit dem „Grafik“-Button rechts oben auch eine „Blutzucker-Verlaufskurve“ öffnen. Hier können Sie 1, 7, 14 oder 28 Tage als Zeitraum einstellen. Über den angezeigten „Häuschen-Button“ rechts oben gelangen Sie wieder zurück in die Tagebuchansicht.

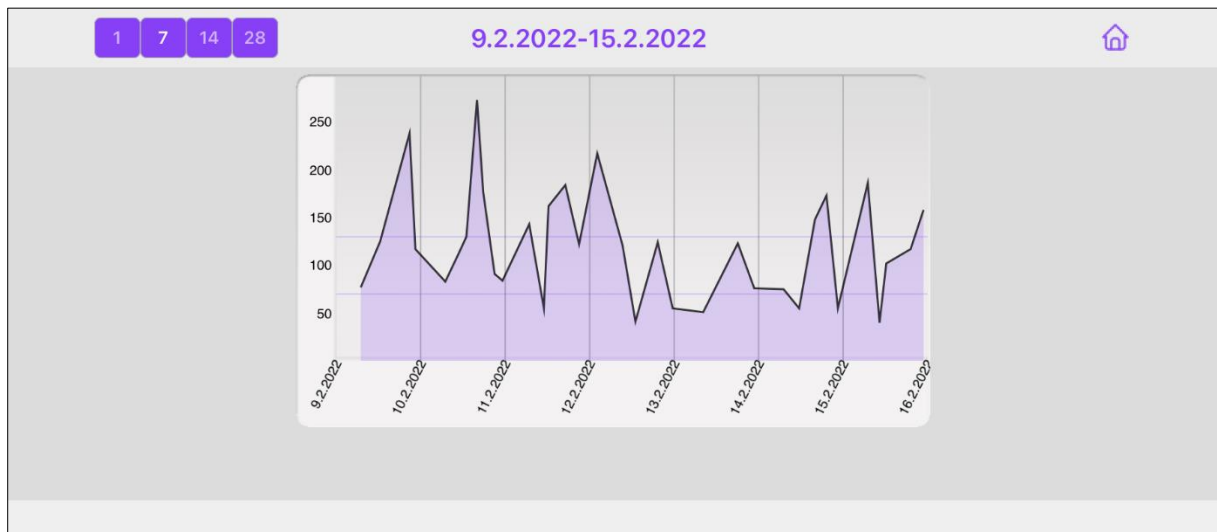

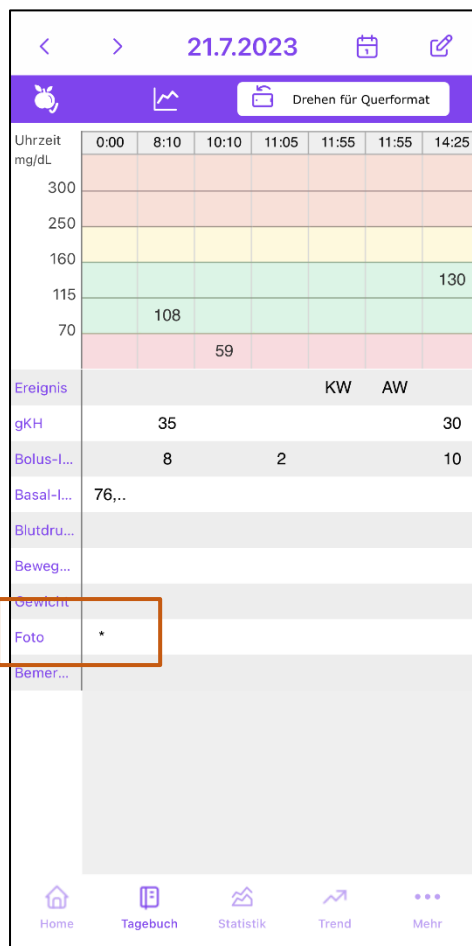

Die App unterstützt auch das Aufnehmen und Anzeigen von Fotos. So können Sie z.B. Ihre Mahlzeiten auch im Bild dokumentieren, um das bei Bedarf z.B. Ihrem Diabetesteam zu zeigen.

Das Vorhandensein eines oder mehrerer Fotos wird in der Zeile ‚Foto‘ durch ein oder mehrere Sternchen angezeigt.

Wenn Sie das Sternchen antippen, dann werden Ihnen die vorhandenen Fotos angezeigt. Sie können dort weitere Fotos hinzufügen oder auch schon vorhandene Fotos wieder löschen.

Einige Hinweise/Tipps:

- Bei den „Ereignissen“ und der „Bewegung“ speichert Vivora diCare Ihre individuellen Eingaben. So können Sie bei den nächsten Eintragungen die jeweilige Form der „Bewegung“ oder ein „Ereignis“ aus der Liste auswählen.
- Das „Gewicht“ und die zurückgelegten „Schritte“ werden einmal pro Tag gespeichert. So übernimmt das System beim Auslesen Ihres Schrittzählers z.B. immer die Schritte des Vortags in Ihr „Tagebuch“.
- Pro Tag gibt es ein Bemerkungsfeld. Die Uhrzeit Ihrer Eintragung wird dabei automatisch übernommen.


6 Statistik



Die „Statistik“ erreichen Sie über die untere Navigationszeile und den Button „Statistik“. Beim Öffnen ist immer das aktuelle Datum eingestellt, das Sie aber über das „Kalendersymbol“ ändern können, um sich andere Tage anzuschauen. Sie haben über die Pfeiltasten oben die Möglichkeit, einen Tag oder den über den Filter eingestellten Zeitraum vor- und zurückzuspringen. Mit einem Wisch nach links oder einem Klick auf die Pfeiltasten neben „Grafiktyp ändern“ können Sie zwischen verschiedenen Grafiktypen wechseln.

Einstellg.	Fertig
Zeitraum	
7 Tage	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Tage	<input type="checkbox"/>
1 Monat	<input type="checkbox"/>
3 Monate	<input type="checkbox"/>
6 Monate	<input type="checkbox"/>
12 Monate	<input type="checkbox"/>
Filter	
Alle Werte	<input checked="" type="checkbox"/>
Vor Frühstück	<input type="checkbox"/>
Nach Frühstück	<input type="checkbox"/>
Vor Mittagessen	<input type="checkbox"/>
Nach Mittagessen	<input type="checkbox"/>
Vor Abendessen	<input type="checkbox"/>
Nach Abendessen	<input type="checkbox"/>

Über das „Filtersymbol“ rechts oben gelangen Sie zu den Statistikeinstellungen. Hier können Sie den angezeigten Zeitraum und die Filterzeitpunkte (z.B. vor dem Frühstück, nach dem Frühstück usw.) anpassen. Sind hier z.B. 14 Tage als Zeitraum eingestellt, springen Sie über die Pfeiltasten 2 Wochen nach vorne oder zurück.

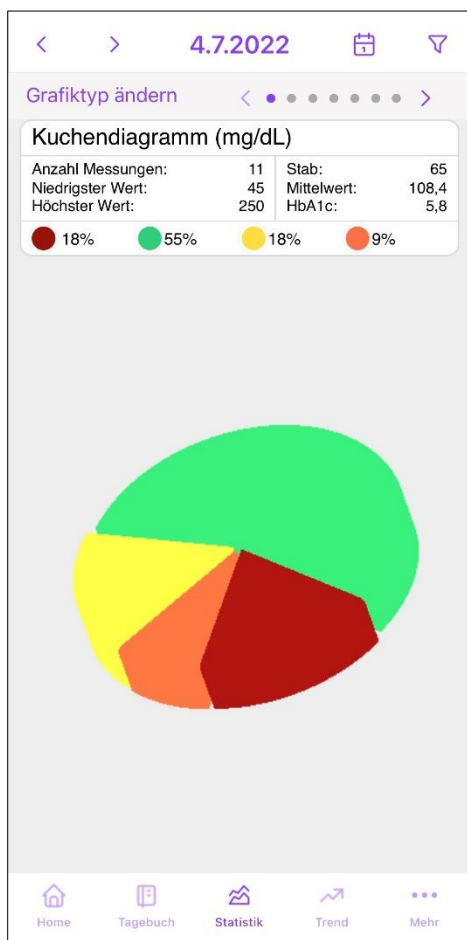

Der erste Grafiktyp ist das „Kuchendiagramm“ mit der Verteilung Ihrer Blutzucker- bzw. Glukosewerte.


Grün = Werte, die in Ihrem eingestellten Zielbereich liegen.

Rot = Werte unterhalb Ihres Zielbereichs (Hypoglykämien bzw. Unterzuckerungen)


Gelb = leichte Hyperglykämien (Überzuckerungen)

Orange = schwere Hyperglykämien (Überzuckerungen)


Weitere Faktoren (Parameter) sind oben aufgeführt: „Anzahl der Messungen“, „höchster Wert“ bzw. „niedrigster Wert“, „Standardabweichung (Stab)“, „Mittelwert“ und der errechnete „HbA1c“.

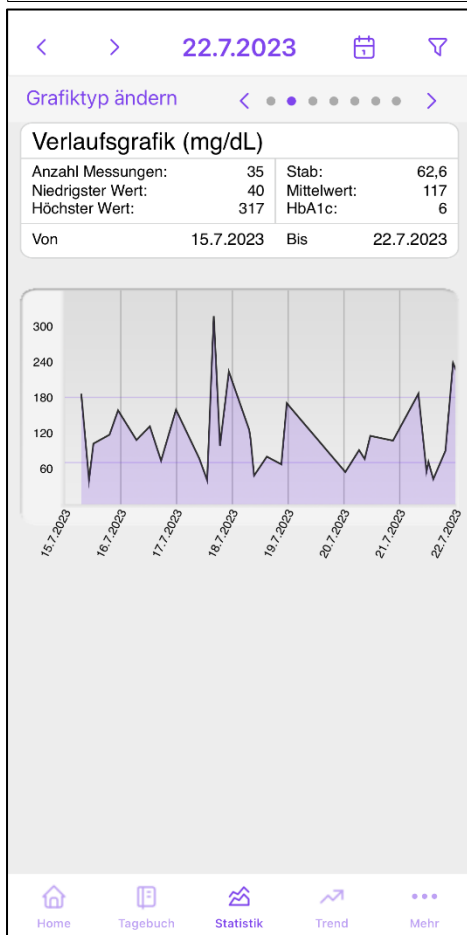

In der „Verlaufsgrafik“ sehen Sie den Kurvenverlauf Ihrer Blutzucker- bzw. Glukosewerte für den eingestellten Zeitraum. Über diese Tabelle sind zudem die Faktoren „Anzahl Messungen“, „Niedrigster und höchster Wert“, „Standardabweichung“, „Mittelwert“ und der „errechnete HbA1c“ einsehbar.

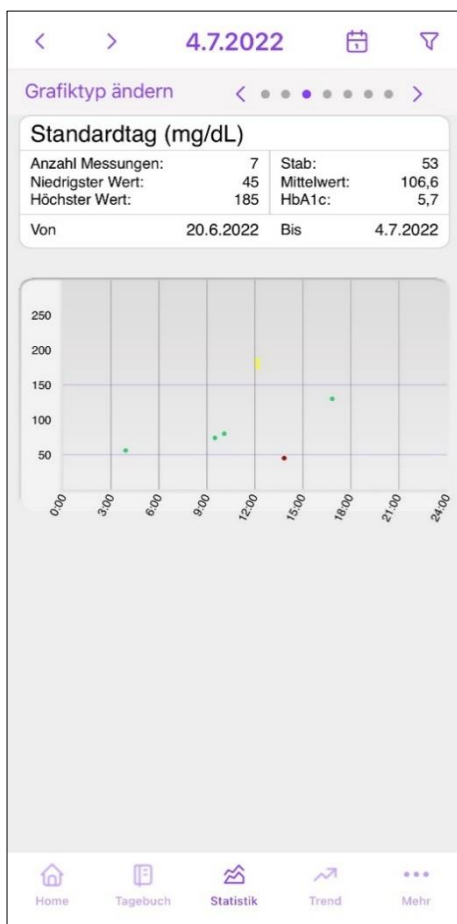


Der „Standardtag“ zeigt Ihnen alle Blutzucker- bzw. Glukosewerte des ausgewählten Zeitraums in einer 24-Stunden Tag-Übersicht. Sie gibt Ihnen einen schnellen Überblick darüber, zu welchem Tageszeitpunkt Sie am häufigsten messen und wann die Werte am breitesten streuen. Zudem sind auch hier über die Tabelle die Parameter „Anzahl Messungen“, „Niedrigster und höchster Wert“, „Standardabweichung“, „Mittelwert“ und der „errechnete HbA1c“ einsehbar.

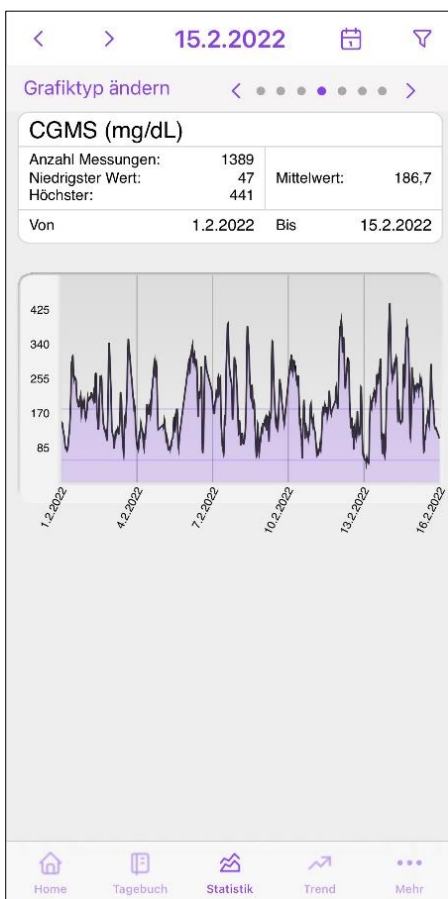

Sofern Sie ein **CGM- bzw. iscCGM (FGM)-System** nutzen, werden Ihre Daten in der Statistik wie links dargestellt. Wegen der großen Datenmenge für eine übersichtliche Darstellung im „Tagebuch“, wird vor allem auf dem Smartphone die „Verlaufsgrafik“) empfohlen. Die Tabelle oben zeigt Ihnen zudem die „Anzahl der Messungen“, den „Niedrigsten und den höchsten Wert“ sowie Ihren „Mittelwert“.



Den aktuellen Stand Ihres „Gewichts“ können Sie in dieser Grafik verfolgen. Sie haben zudem wieder eine Übersicht über die „Anzahl der Messungen“, den „Niedrigsten und höchsten Wert“ sowie Ihren „Mittelwert“.

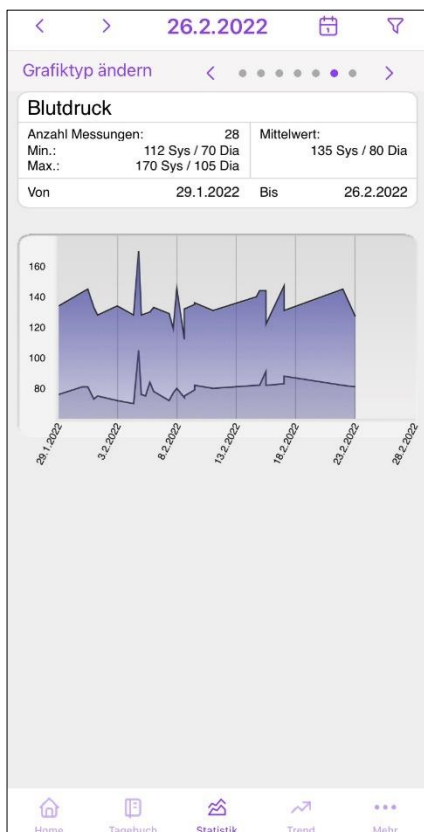

Die Statistik für den „Blutdruck“ liefert Ihnen einen Überblick über den höchsten (Max.), bzw. den niedrigsten (Min.) gemessenen systolischen und diastolischen Blutdruck sowie die Mittelwerte für Systole (oberer Wert) und Diastole (unterer Wert).



Detailstatistik	
Anzahl Messungen:	17
Niedrigster Wert:	81 mg/dL
Höchster Wert:	133 mg/dL
Mittelwert:	99,8 mg/dL
Standardabweichung:	14,8
Errechneter HbA1c-Wert:	5,5 %
Ø-KE/Tag:	0
Ø-Bolus1/Tag:	0
Ø-Bolus2/Tag:	0
Ø-Basal1/Tag:	0
Ø-Basal2/Tag:	0
Ø-Total-Insulin/Tag:	0
Ø-Gewicht:	92,38 kg
Ø-Gesamtinsulin/Körpergewicht:	0

Ein weiterer Grafiktyp ist die „Detailstatistik“. Sie zeigt Ihnen weitere Auswertungen wie z.B. die Durchschnittsmengen für BE/ KHE, Bolus- und Basalinsulin als Texte an.

7 Trend



Über den Button „Trend“ in der unteren Navigationszeile erreichen Sie diese Übersicht. Der „Trend“ vergleicht zwei Zeiträume miteinander und analysiert dabei den Verlauf des jeweiligen Parameters.

Zu den Einstellungen (welche Zeiträume und Tageszeitpunkte verglichen werden sollen) gelangen Sie über das „Filter-Symbol“ oben rechts. Über das ebenfalls oben rechts befindliche „Kalendersymbol“ können Sie individuell ein Datum auswählen, ab dem die Berechnung beginnen soll. Mit den Pfeiltasten springen Sie, je nach eingestelltem Zeitraum, z. B. eine Woche vor oder zurück.

Legen Sie in den Einstellungen z. B. „7 Tage“ als Zeitraum fest, werden die letzten 7 Tage mit den 7 Tagen davor verglichen.

Ihre erreichten Werte stellen meist Durchschnittswerte Ihres eingestellten Zeitraums dar.

Die „Pfeilsymbole“ zeigen jeweils an, ob Ihre Werte zum Vergleichszeitraum gestiegen, gesunken oder gleichgeblieben sind.

Ihre erreichten Werte werden außerdem mit Ihrem Zielwert verglichen und anhand grüner, gelber und roter Smileys bewertet.


8 Mehr

Mehr	
Grundeinstellungen	>
Tagebucheinstellungen	>
Hilfe & Kontakt	>
Über & Datenschutz	>
Bewertung Vivora diCare	>

Unter „Mehr“ haben Sie folgende Möglichkeiten:

- [Grundeinstellungen](#)
- [Tagebucheinstellungen](#)
- [Hilfe & Kontakt](#)
- [Über & Datenschutz](#)
- [Bewertung Vivora diCare](#),

8.1 Grundeinstellungen

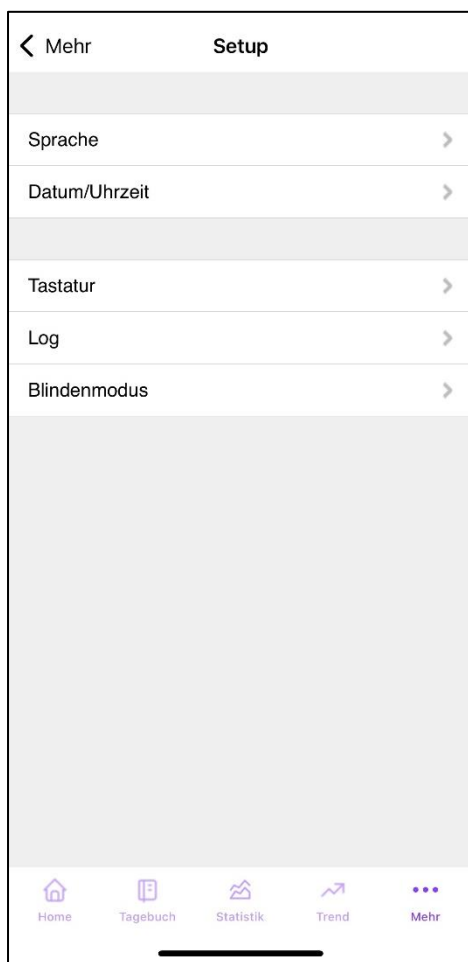


Um Grundeinstellungen für die Vivora diCare App vorzunehmen, gehen Sie unter Mehr auf „Grundeinstellungen“. Hier können Sie unter anderem die Sprache und das Datum/Uhrzeit-Format wählen.

Im Bereich „*Tastatur*“ können Sie auswählen, ob Sie die Vivora diCare-App optimierte Tastatur oder die iOS-Standard-Tastatur verwenden möchten.

Im Bereich „*Log*“ können Sie das Schreiben eines Log-Protokolls aktivieren. Dieses Protokoll ermöglicht es den Entwicklern von Vivora diCare, bei eventuell auftretenden Programm- oder Softwarefehlern (sog. Bugs) schneller und effizienter reagieren und diese gezielt beseitigen zu können.

Der „*Blindenmodus*“ unterstützt die App bei der Nutzung der Vorlese-Anwendung (sog. Screenreader „VoiceOver“). Hier wird zur besseren Lesbarkeit z. B. in der „*Statistik*“ bewusst auf grafische Elemente verzichtet und lediglich die tabellarische Detailstatistik angewandt.

8.2 Tagebucheinstellungen

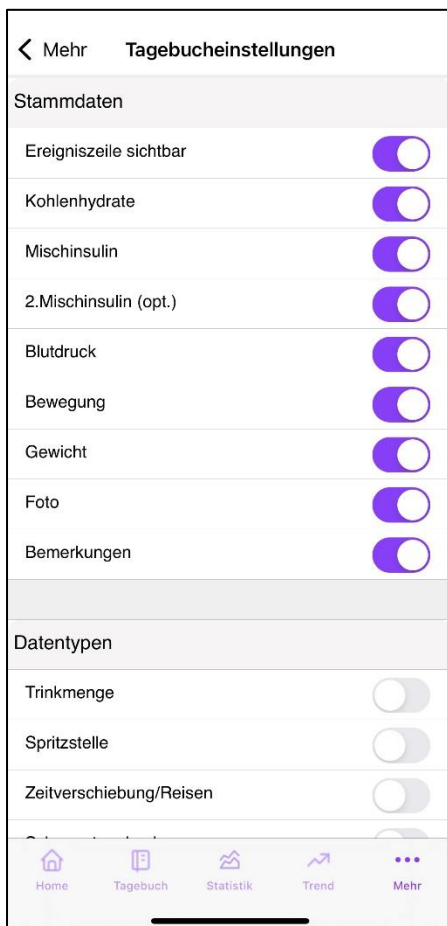

Der Bereich „Tagebucheinstellungen“ gliedert sich in „Stammdaten“ (z. B. Kohlenhydrate, Insuline), die standardmäßig im „Tagebuch“ hinterlegt sind, und in „Datentypen“ (z. B. Spritzstelle, Eiweiß u.a.), die Sie individuell erweitern können. Damit legen Sie fest, welche Informationen Ihnen im „Tagebuch“ und in der „Werteeingabe“ angezeigt werden sollen und welche nicht. Die App unterstützt dabei alle „Datentypen“, die Sie auch in der PC-Version oder in der Online-Version von Vivora diCare nutzen können.


8.3 Hilfe & Kontakt



Unter Hilfe und Kontakt erhalten Sie Informationen, wie Sie unseren Kundenservice per E-Mail oder Telefon erreichen können.

Außerdem gelangen Sie über den Link auf unsere Homepage, die alle Anleitungen und weitere Fragen und Antworten für Sie bereitstellt.

8.4 Über & Datenschutz

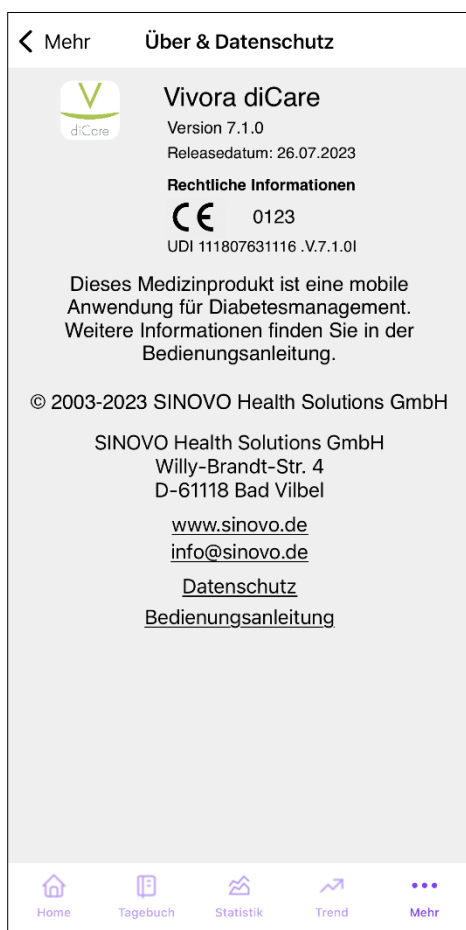

In diesem Bereich sind die wichtigsten Informationen zum Produkt und zum Datenschutz nachzulesen. Hier erhalten Sie auch Zugriff auf die Bedienungsanleitungen.

8.5 Bewertung Vivora diCare



Hier können Sie eine „*Bewertung*“ und Ihre Erfahrungen mit der Vivora diCare App direkt im App Store teilen.

Bei besonderen Problemen oder Anliegen bitten wir Sie, direkten Kontakt unter folgender E-Mail-Adresse aufzunehmen: info@evivamed.de
So lässt sich Ihr Anliegen umgehend gezielt bearbeiten.

Hinweis:

Falls Sie es wünschen, werden wir Ihnen diese Bedienungsanleitung gern auch umgehend und kostenfrei als Ausdruck in Papierform zukommen lassen. Bitte schicken Sie uns in dem Fall eine E-Mail mit Ihrer Postadresse an info@evivamed.de

Vertrieb in Deutschland durch:

EvivaMed Deutschland GmbH

Thanhof 13

93173 Wenzenbach/Regensburg

info@evivamed.de

www.evivamed.de

<https://vivora.health>