


## Anbindung/Kopplung von Bluetooth-Geräten an die Vivora diCare App

Um erstmalig ein neues/weiteres Gerät mit Vivora diCare zu koppeln, gehen Sie wie folgt vor: Achten Sie immer auf eine **aktive Bluetooth-Verbindung** auf Ihrem Smartphone und dem Messgerät, sowie auf volle/n **Batterien/Akku** Ihrer Geräte.


1

- Klicken Sie in Ihrer Vivora diCare App unten links auf **Home** und anschließend oben auf **Meine Profileinstellungen**.

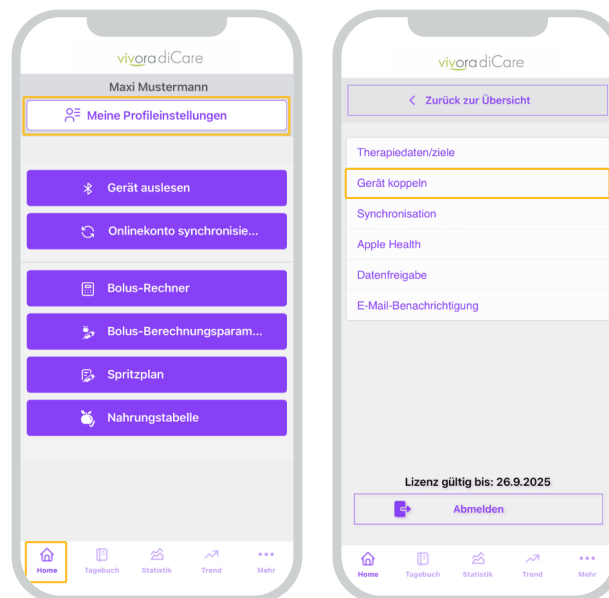


2

- Wählen Sie anschließend den **Hersteller** und das **Gerät** aus, welches Sie mit Vivora diCare verbinden möchten.

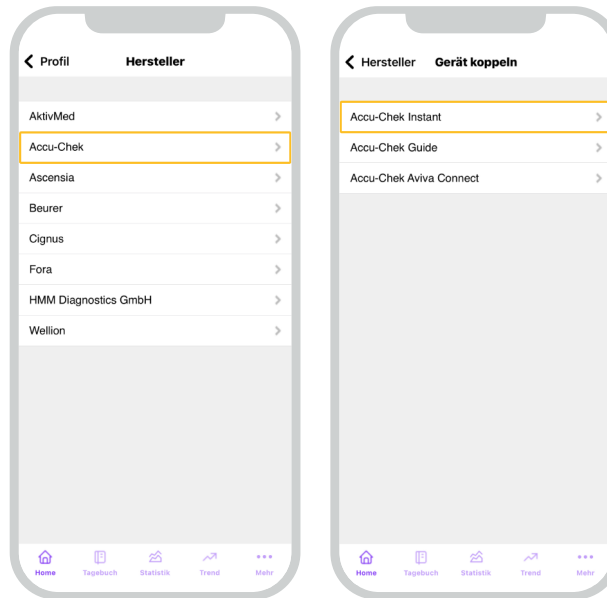

3

- Klicken Sie nun auf **Gerät auslesen** und vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem gewählten Gerät Bluetooth aktiv ist. Anschließend erkennt Vivora diCare die Kopplungsanfrage.

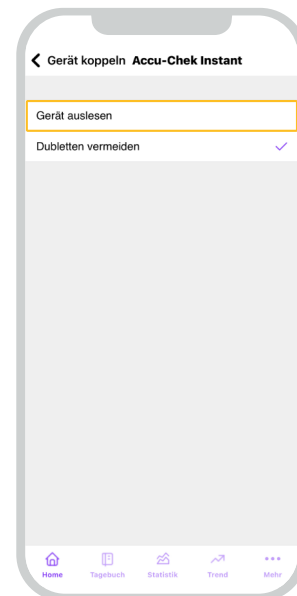


4

- Bestätigen Sie die Kopplung mit **Ok** und befolgen Sie ggf. weitere Anweisungen der App.

5

- Bei erfolgreicher Kopplung erscheint eine Gerätemummer und bereits gespeicherte Werte werden übertragen. Außerdem finden Sie Ihre gekoppelten Geräte unter **Home** und **Gerät auslesen** wieder.

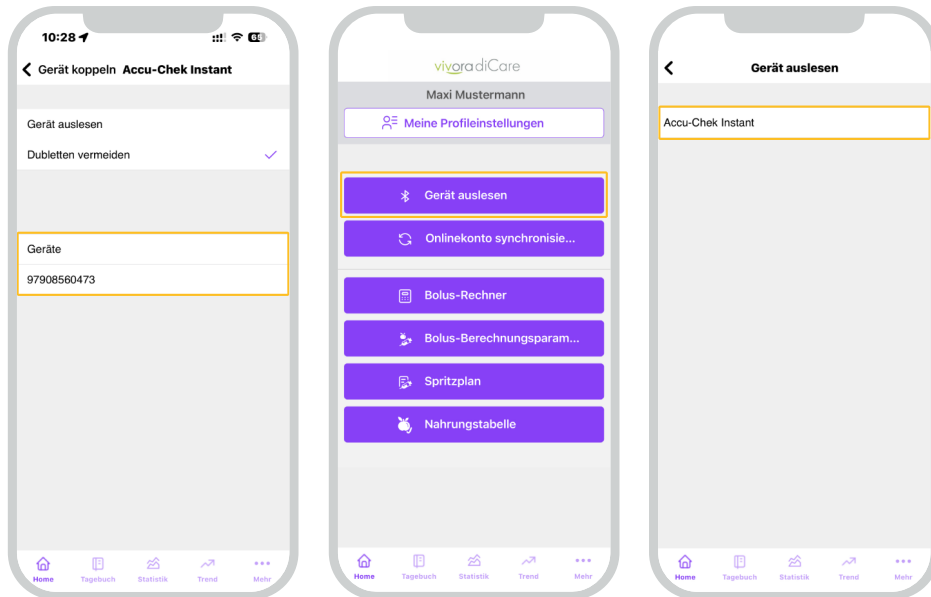

# MANUELLER AUSLESEVORGANG:

- Die Daten Ihres gekoppelten Messgeräts können von nun an **manuell** ausgelesen werden.
- Klicken Sie hierfür im Homescreen auf **Gerät auslesen** und wählen Sie anschließend Ihr Gerät aus. Hierfür muss der Auslesevorgang, sowie die Bluetooth-Verbindung in Ihrem Blutzuckermessgerät aktiviert sein.
- Nach erfolgreicher Datenübertragung können Sie Ihre Daten im Tagebuch einsehen.

