

## Start der Vivora diCare App


1

- Laden Sie sich die **Vivora diCare App** im App Store / Google Playstore herunter.




2

- Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an, die Sie im Rahmen der Registrierung für Ihr Onlinekonto festgelegt haben. Nach erfolgreicher Anmeldung startet automatisch die **Synchronisation** ihrer Daten aus dem Onlinekonto.

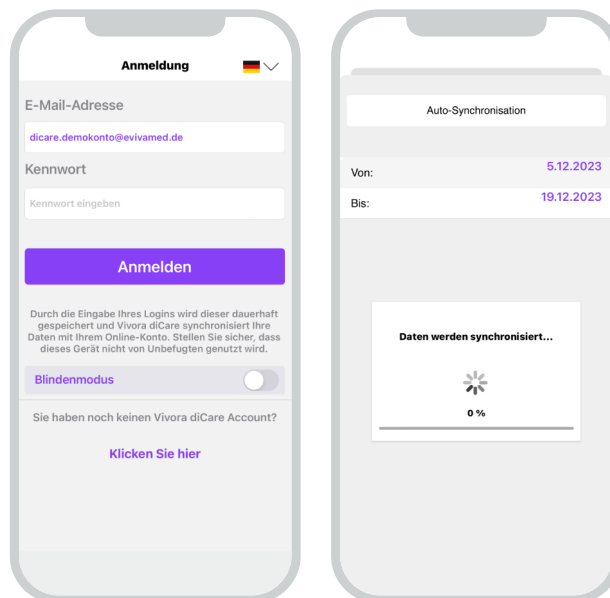


- Sie können Ihre Daten automatisch und einfach mit Ihrem Diabetes-Team teilen und freigeben. Dazu klicken Sie auf **Home** und anschließend auf **Meine Profileinstellungen**.
- Klicken Sie auf **Datenfreigabe** und geben Sie dort den Praxiscode ein, welchen Sie von Ihrem Diabetes-Team erhalten haben.
- Wenn Sie Ihrem Diabetes-Team eine Schreibfreigabe erteilen möchten, entfernen Sie das Häkchen bei **Nur-Lesen-Freigabe**.
- Bestätigen Sie den Vorgang indem Sie auf **Daten freigeben** klicken.

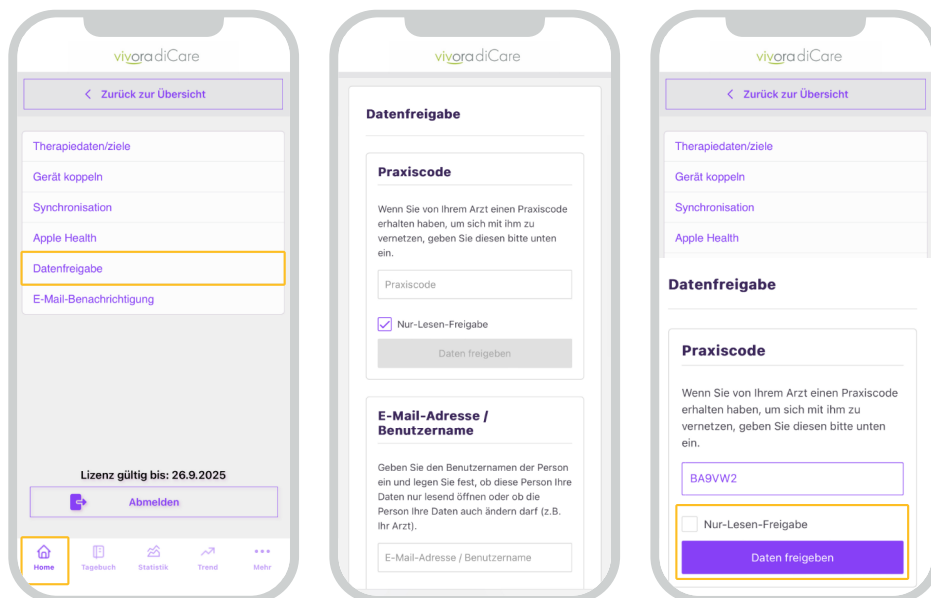

FALLS SIE IHRE SCHRITTE AUS APPLE HEALTH AUTOMATISCH ÜBERTRAGEN LASSEN MÖCHTEN, GEHEN SIE BITTE WIE FOLGT VOR:

- Klicken Sie auf **Home** und anschließend auf **Meine Profileinstellungen**. Wählen Sie hier den Punkt **Apple Health** aus. Bestätigen Sie den Schieberegler **Daten importieren** (nach Bestätigung lila ausgefüllt). Wenn Sie möchten, können Sie ebenfalls Daten **exportieren bestätigen**. \*
- Jetzt öffnet sich automatisch Apple Health.
- Bestätigen Sie die gewünschten Import bzw. Exportfunktionen. Zusätzlich können Sie auch Blutzuckerwerte importieren (z.B. Dexcom Clarity).
- Bitte bedenken Sie, dass die Übertragung der Daten aus Apple Health teilweise zeitverzögert übermittelt wird.

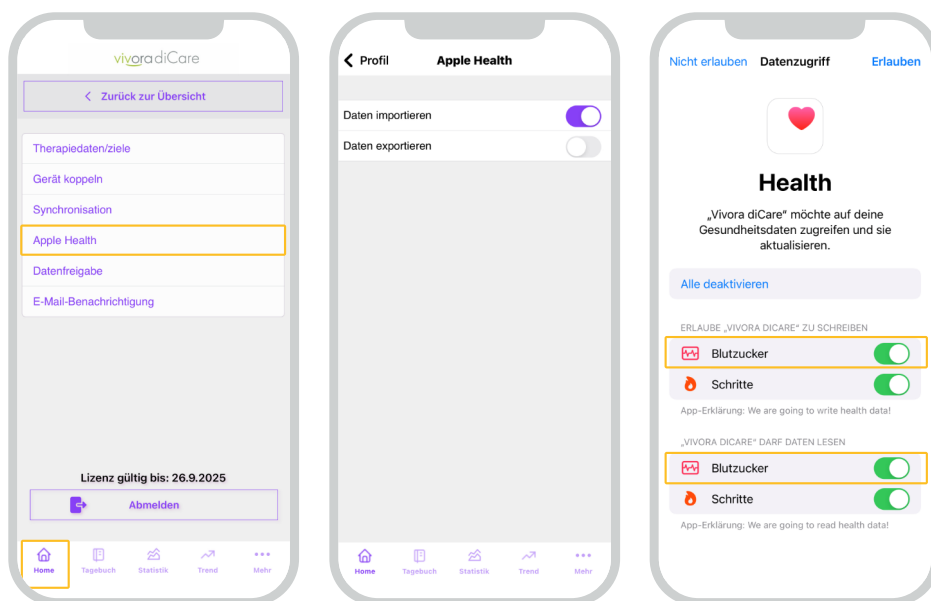

\*Daten importieren erlaubt es der Vivora App Daten aus Apple Health zu lesen. Daten exportieren erlaubt es Apple Health Daten aus der Vivora App zu importieren.

- Ihre Schritte sehen Sie dann im **Tagebuch** in der entsprechenden Zeile.
- Übertragene CGM-Werte sehen Sie ebenfalls im **Tagebuch**.
- Für die detaillierte Ansicht der CGM-Kurve, klicken Sie in der oberen Zeile auf das **Kurven-Symbol**.

